

## 1. Name des Produkts

Massagekissen

## 2. Produktcode

16800840



## 3. Kurzbeschreibung

Dieses waschbare Massagekissen ist perfekt für den intensiven Gebrauch. Üben Sie Druck auf das Kissen aus, damit es vibriert, und lassen Sie es los, um es zu stoppen. Gibt eine sanfte Massage. Das Kissen verfügt über zwei verschiedene Massagestufen. Dieses vibrierende Kissen ist ein perfektes Werkzeug, um beruhigende, regulierende Wirkungen zu erzielen und wird auch eine große Hilfe bei der Behandlung von Störungen der sensorischen Integration sein. Das Kissen kann über ein USB-Kabel aufgeladen werden, danach kann das Kissen 18 Stunden lang verwendet werden. Die Farben variieren. Gewicht: 500 Gramm. Funktioniert mit Ein-/Ausschalter

## 4. Sinnliche Stimulationen

Fühlen

## 5. Technische Informationen

Größe: ca. 30 x 30 x 9 cm Gewicht: ca. 425 g)

Nennspannung: DC 5 V Nennleistung

: 0,8 W

Batteriekapazität: 2200 mA

## 6. Vorsichtsmaßnahmen

1. Um die beste Leistung zu erhalten, sollten Sie den Akku vor dem ersten Aufladen entladen, eine volle Ladezeit von 6-8 Stunden und eine Überladezeit von mehr als 10 Stunden wird nicht empfohlen.
2. Verwenden Sie es nicht länger als zwei Stunden am Stück.
3. Im Falle eines Kurzschlusses oder eines Brandunfalls sollten Sie sich von Feuer, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht bei hohen Temperaturen lagern.
4. Wenn Sie es reinigen, wischen Sie es mit desinfizierter Baumwolle ab, die in einem neutralen Reinigungsmittel getränkt ist. Der Schalter ist mit dem Deckel verbunden, nehmen Sie den Deckel nicht ab. Nicht in Wasser tauchen.
5. Nicht empfohlen für schwangere Frauen
6. Massagekissen zum Anlehnen oder Ausruhen, keine schweren Gegenstände darauf legen.
7. Während des Gebrauchs, bei ungewöhnlichen Umständen oder Beschwerden, sollten Sie die Verwendung sofort einstellen.

## 7. Hauptmerkmale

- Automatische Start/Stop-Massage. Es fängt an, wenn man sich darauf stützt, und hört auf, wenn man geht.
- Kabelloses Design mit wiederaufladbarem Lithium-Akku, 5-V-USB-Schnittstelle, einmaliges Aufladen für 18 Stunden (7-9 Tage) Nutzung.
- Beruhigende Multi-Mode-Vibrationsmassage für alle Körperteile, um Müdigkeit zu lindern.





- Es kann auch die Verdauung verbessern und beim Abnehmen helfen, wenn es zur Bauchmassage angewendet wird.
- Es ist tragbar (425 g) und kann im Auto, zu Hause oder im Büro verwendet werden.

## 7. Inbetriebnahme

1. Lehnen Sie sich auf das Kissen, um die Massage automatisch zu starten, Sie können den Ein-/AUS-Schalter drücken, um die Massage jederzeit zu stoppen, drücken Sie diese Taste erneut, um die Massage fortzusetzen. Durch kreisförmiges Drücken dieser Taste kann auch eine andere Intensität ausgewählt werden.
2. Wenn Sie das Kissen verlassen, stoppt es automatisch.
3. Es kann für eine entspannende Massage auf alle Körperteile aufgetragen werden. Es wird mit einem USB-Kabel geliefert. Schließen Sie dieses Kabel zum Aufladen an einen USB-Anschluss an, z. B. an einen Computer, einen Adapter oder eine Powerbank.

! Verwenden Sie das Massagegerät NICHT im Badezimmer oder an ähnlichen nassen/feuchten Orten, da eine solche Umgebung die Lebensdauer des Massagegeräts verkürzen kann. !

Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder in der Nähe von Heizungen und anderen Wärmequellen aufgestellt wird."

## 8. Wartung

- Vor der Reinigung ausschalten.
- Nur mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm reinigen. Lassen Sie das Gerät niemals nass werden.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in eine Flüssigkeit.
- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glas-/Möbelpolitur oder Farbverdünner, um dieses Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel, um die Außenseite des Massagegeräts zu reinigen, da diese Chemikalien das Material beschädigen können.
- Verwenden Sie Ihr Massagegerät nicht, wenn es defekt ist. Oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Person inspizieren, zerlegen Sie es nicht selbst.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

