

1. Produktname

UV-Leuchtfaser-Stränge 100 x 2 m

2. Artikelnummer

17558112



3. Beschreibung

Hergestellt aus Kunststoff zur Erhöhung der Sicherheit. Sekt, faszinierende, erstaunliche und jetzt auch beleuchtet! Diese Leuchtfaser twinkeln wie die gewöhnliche Leuchtfaser, aber es gibt noch mehr! Die Verwendung dieser Stränge unter UV-Licht, bietet im Dunkeln zusätzliche visuelle Stimulation. Funktioniert auf Lichtquelle (separat zu bestellen).

4. Inhalt

1x UV-Leuchtfaser-Stränge 100 x 2 m

5. Snoezelen Stimulationen

Sehen und fühlen

6. Technische Informationen

Durchmesser: 30 mm Durchmesser

Leuchtfaser: dieser Kunststoff-Faser sind etwas dicker als wie Glasfaser.

Gewicht: z.B. 17557-1 kg; 20174, 17558-2 kg

7. Sicherheit

LWL-Produkten sind eine ständige Quelle der sichere visuelle und taktile Stimulation, aber sie sollte immer unter professioneller Aufsicht verwendet werden. Leuchtfaser sind sicher, wenn richtig eingesetzt und überwacht. Obwohl sie sicher über das Gesicht gestrichelt werden können, ist es nicht geeignet es nicht in den Mund zu stecken. Diese Leuchtfaserstränge sind extrem stark aber können brechen, wenn darauf gekaut wird.

8. Installation

1. Entfernen Sie die Verpackungen und temporäre Anleihen, die die Leuchtfaser zusammenzuhalten.
- 2 die Nabe in die Öffnung (zylindrische Metallrohr) der Lichtquelle Licht Quelle-Insert Hub (Metallzylinder gegenüber den Enden) befestigen. Wenn dies mit Leuchtfaser verwendet wird, ist es möglicherweise notwendig, die Position der Nabe im Tor (d.H. nicht ganz nach innen geschoben) entsprechen zu ermöglichen, die wie viele Stränge beleuchtet werden.
3. Verwenden sie die Gebrauchsanweisung für die Installation der Lichtquelle und UV-Licht.

9. Wartung

- Reinigen Sie die Leuchtfaser regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch.
- Nicht auf die Leuchtfaser laufen, brechen, quetschen, voll beugen usw.

Bitte besuchen Sie unsere Website www.nenko.de für weitere Informationen.

