

1. Produktname

Snoezelen-Wagen mit LED-Bildschirm

2. Produktcode

21967010

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Dieses Snoezelen-Wagen mit LED-Bildschirm wird aus Sicherheits- und Servicegründen in einer Transportbox aus Holz geliefert.

= Wir empfehlen, diese mitgelieferte Transportbox aus Holz für alle Servicezwecke zu behalten =

1. Öffnen Sie die Transportbox mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Entsperren Sie die Bremsen der Vorderräder an der Unterseite des Snoezelen-Wagen und fahren Sie den Wagen aus der Transportbox.
3. Hängen Sie den Fasernebel neben den Wagen.
4. Dann ist der Schlüssel zu sehen, mit dem die Vorder- und Rückseite des Snoezelen-Wagen geöffnet werden kann. Der Schlüssel des Snoezelen-Wagen befindet sich im Griff der niedrigen Tür, er ist mit einem Krawattenwickel befestigt.
5. Öffnen Sie die niedrige Schranktür an der Vorderseite des Snoezelen-Wagen mit dem mitgelieferten Schlüssel.
6. Nehmen Sie den weißen LED-Projektor und den Laserstars-Projektor aus dem Schrank und platzieren Sie sie auf den Wagen. Der weiße LED-Projektor befindet sich im rausfahrbaren-Teil des Snoezelen-Wagen.
7. Verbinden Sie die Projektoren auf der Oberseite des Wagens mit relevanten Produkten, das kleine Kabel am grauen Laserstars-Projektor und das dickere Kabel am LED-Projektor. Folgen Sie bitte der Nummerierung der Kabel sorgfältig und gemäß der mitgelieferten Karte.
8. Nehmen Sie das 3 Meter lange Stromkabel aus dem Schrank und legen Sie eine Seite dieses Stromkabels in den Anschluss an der Außenseite des Snoezelen-Wagen (rechter Seite von vorne gesehen) und legen Sie die andere Seite des Stromkabels in die Steckdose in dem Raum, in dem das Snoezelen-Wagen verwendet wird.
9. Nehmen Sie dann den Adapter (Anschluss t.b.v. die Blaseneinheit) aus dem Schrank und legen Sie ihn in den anderen Anschluss, der sich an der Außenseite des Snoezelen-Wagen unter dem Fasernebelstrang befindet.
10. Mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen Sie nun auch die Rückseite des Snoezelen-Wagen. Hier ist ein rausfahrbare-Abschnitt mit der Blaseneinheit und dem Spiegel auf der Rückseite. Diese hölzerne "Platte" lässt sich leicht entfernen, indem man sie vorsichtig am Griff zurückzieht.
11. Platzieren Sie den rausfahrbare-Abschnitt mit der Wassersäule neben dem LED-Bildschirm und blockieren Sie die Räder des rausfahrbare-Abschnitts vor dem Gebrauch.
12. Füllen Sie die Wassersäule zu 80% mit Wasser, so dass auch noch Platz für die Blasen bleibt.
13. Stecken Sie die andere Seite des kleinen Stromkabels, das gerade an der Außenseite des Snoezelen-Wagen platziert wurde, in der Wassersäule, damit diese ebenfalls mit Strom versorgt wird.
14. Öffnen Sie dann den Schrank an der Vorderseite des Snoezelen-Wagen wieder; in diesem niedrigen Schrank befindet sich ein Schaltschrank mit 6 roten Tasten. Diese Tasten sind die Ein-



/Ausschalttasten der elektronischen Produkte und Teile, die in und auf dem Snoezelen-Wagen verwendet werden. Im mitgelieferten (und unten) Diagramm ist deutlich angegeben, welche Taste für welches Gerät ist (von links nach rechts).

Hinweis: Stecken Sie immer zuerst den Stecker an der Außenseite des Snoezelen-Wagen in die Steckdose und schalten Sie erst dann alle roten Tasten ein!

Taste 1 Externer Anschluss für Wassersäule

Taste 2 Fasernebel

Taste 3 LED-Bildschirm

Taste 4 LED-Projektor und Laserstar-Projektor

Taste 5 DVD-Spieler

Taste 6 Aromadiffusor

15. Der LED-Bildschirm kann natürlich nur gleichzeitig mit dem DVD-Spieler verwendet werden. Die anderen Materialien können getrennt voneinander verwendet werden.
16. Vergessen Sie nicht den mitgelieferten Dose! Dieser findet sich im niedrigen Schrank. In dieser Dose befindet sich die Fernbedienung für den DVD-Spieler, eine DVD, 2 Effekträder und 4 Duftmischungen (diese Düfte können mit dem Aromadiffusor verwendet werden).
17. Setzen Sie ein Effektrad in den LED-Projektor ein und überprüfen Sie, ob alle Tasten an den Projektoren auf "Ein" eingestellt sind.
18. Lassen Sie 4 Tröpfchen einer der Duftmischungen auf das Aroma-"Pad" fallen, das sich am Boden des Aromadiffusors befindet. Schrauben Sie den Boden des Aromadiffusors ab, lassen Sie 4 Tröpfchen einer Duftmischung Ihrer Wahl auf das Aroma-"Pad" fallen und schließen Sie den Boden des Aromadiffusors wieder.
19. Der Snoezelen-Wagen ist jetzt einsatzbereit!

5. Sinne-Stimulation

Fühlen, riechen, hören und sehen

6. Leistungsbeschreibung

Größe: 65 x 60 x 147 cm

Stromversorgung: 220 V

7. Einschließlich

2 x Projektor

1 x Wassersäule

1 x Faseroptikstränge

1 x Lichtquelle für Fasernebel

4 x Ätherisches Öl

2 x Effektrad

1 x DVD

1 x Aromadiffusor

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de