

Inbetriebnahme eines Snoezelenwagens

Sie erhalten den Snoezelenwagen in einer Holzkiste, siehe Fotos unten.

- 1) Die Holzkiste wird mit Schrauben zusammengebaut. Sie müssen also die vordere Holzplatte abschrauben.
- 2) Aufgrund des Gewichts und um Beschädigungen zu vermeiden, heben/fahren Sie den Wagen mit 2 Personen aus der Holzkiste
- 3) Die Folie des Plexiglasses des Aquariums bzw. Bildschirm (je nach Ausführung) kann nun entfernt werden



- 4) Entfernen Sie den Schlüssel und öffnen Sie die Tür.
- 5) Gleiches gilt für den Hinterseite. Der Schlüssel hängt in der Öffnung der Tür (am Griff) an einem Kabelbinder. Beim Materialwagen befindet sich der Schlüssel oben auf dem Wagen (44502010).
- 6) Kippen Sie den hinteren Teil mit Hilfe der Fußstütze leicht schräg nach hinten, um das Ein- und Ausfahren zu erleichtern
- 7) 7) Füllen Sie nun das Blasenrohr mit Wasser, achten Sie darauf, dass Sie kein Wasser überfüllen oder außerhalb des Rohrs gießen, um Schäden an elektronischen Teilen zu vermeiden. Weitere Anleitungen für Blasenschläuche finden Sie auf unserer Website. Achtung !

Schließen Sie den Sensorwagen noch nicht an, wenn er noch nicht mit Wasser gefüllt ist!



- 8) Entnehmen Sie alle Produkte aus der Verpackung und verbinden Sie die losen Stecker anhand der mitgelieferten Liste mit Schema mit den entsprechenden Produkten.
- 9) Der Stecker des Teils mit der Blasensäule kann an der Seite des Sensorwagens angeschlossen werden.



- 10) Im Schrank befindet sich ein Schalterpanel. Auf diese Weise können Sie die Produkte ein- / ausschalten. **AUFMERKSAMKEIT!** Die Artikel selbst können auch einen Ein / Aus-Knopf haben.



Für das Betriebsdiagramm siehe das mitgelieferte Schemakarte.

- 11) Schließen Sie den Wagen an das Stromnetz an und er ist jetzt einsatzbereit!

