

1. Produktname

Beschwertes Kuscheltier - Pilo (2,7 kg)

2. Produktcode

59289872

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Pilo ist ein gewichtetes Stofftier, das durch sein Gewicht in Kombination mit seinen Stoßzähnen und gewichteten Kuschelarmen Erleichterung, Ruhe und Geborgenheit bei Menschen mit Reizverarbeitungsproblemen, Verspannungen und Schlafproblemen schafft. Kinder, Erwachsene sowie ältere Menschen mit Demenz können von der Verwendung dieses Gewichtskuscheltiers profitieren.

Pilo hilft, Reizüberflutung vorzubeugen und bietet durch sein Gewicht und Design Sicherheit. Gewichtungselemente wie diese haben sich als wirksam erwiesen, um Spannungen abzubauen und zu helfen, sich zu beruhigen und besser einzuschlafen.

5. Inbetriebnahme

1. Dieses gewichtete Walross ist einfach auf Ihrem Schoß zu verwenden.
2. Legen Sie den gewichteten Körper auf Ihren Schoß, während der Benutzer sitzt, und lassen Sie dann die Beine an den Hüften hängen. Dies wird Druck auf die Seiten der Hüfte und auf Ihren Schoß ausüben und sich vollständig entspannen.
3. Es ist auch möglich, dieses gewichtete Tier vor dem Schlafengehen auf Ihren Körper zu legen.

6. Sinne-Stimulation

Tastsinn, propriozeptiv

7. Leistungsbeschreibung

Maße: 70 x 51 x 15 cm

Gewicht: 2,7 kg

8. Einschließlich

1 x Verzwäringsknuffel

9. Reinigung

1. Pilo kann in der Waschmaschine in einem Kissenbezug gewaschen werden.
2. Die Gewichtungselemente im Körper sollten vor dem Waschen entfernt werden.
3. Bei 40 Grad waschen, weich waschen.
4. Wenn Pilo nach dem Waschen seine Form ändert, kann er mit den Händen wieder geformt werden.